

⑥ 基因檢測服務採檢流程

step 1



- 取樣前請保持口腔無異物，請勿使用漱口水。
- 請洗淨雙手，再打開採檢管包裝，取出時棉頭部分避免與手部接觸。

step 2



- 將棉棒放至右側下顎牙齦間前後刷 10 下。
- 再將棉棒放至左側下顎牙齦間前後刷 10 下。
- 將棉棒放置舌下至吸飽唾液。

step 3



- 請將棉棒朝上，握緊管壁，並將藍色管蓋轉開。
- 注意不要傾倒採檢管，避免液體流出。

step 4



- 將棉棒朝下，置入管中。請捏緊藍色管蓋。
- 倒置採檢管，並大力來回搖晃 15 下。

step 5



- 確認採檢管、申請單及同意書放入信封，並以室溫保存。

⑦ 產品介紹



方便

口腔唾液取樣，無創免抽血
居家採樣，簡單快捷



全面

數位化儲存基因，一次檢測終身受用
個人化基因體服務，持續更新沒煩惱



專業

運用最新基因檢測平台，準確有效
檢測項目豐富，提供全面規劃資訊

康健基因



關於實驗室

TAF 預防醫學實驗室 ISO/IEC 17025:2017 ;
CNS 17025:2018

Illumina Certified Service Provider
原廠認證實驗室

Oxford Nanopore Technologies Certified
Service Provider 原廠認證實驗室

☎ (886) 3316 - 6428

✉ service@genebook.com.tw

📍 Taiwan Taoyuan

🏠 330 桃園市桃園區新埔六街99號22樓

🌐 www.genebook.com.tw



兒童潛能基因檢測

health

hgt 康健基因
HealthGeneTech

① 潛能與基因

『天賦就像深藏在岩石底下的寶石，沒艱苦的發掘，精心的雕琢，他自己不會發出光彩來 - 張潔』每個寶貝都像一顆等待的寶石，等著父母讓他們發光。而『基因檢測』能及早了解孩子的天賦潛能，適性發展，以此藍圖打造專屬的核心能力發展，讓孩子做他自己，成就自我的最高價值。



1... 潛能是指潛在的能力。一旦經過適當的開發，與相關活動行為聯繫起來並發揮應用，就可以成為顯在能力。


2... 兒童與 0-10 歲時，對世界的認知仍處於探索階段，是大腦發展最快、最敏感的時期，也是對孩子進行潛能開發，奠基未來的最佳時期。

3... 家長若能早一步了解他們潛能的長處與短板，將其長處加以開發，孩子的童年將更加輕鬆、愉悅。

給孩子一個希望的未來

家長的發現、引導，關鍵要方向正確。錯誤的培養會造成孩子的厭煩、不自信，甚至產生逆反心理。試想一下，讓朗朗從小學習打籃球也不能打出姚明的成績。**找準確的方向，科學養育，事半功倍。**

② “金牌基因”的奧秘

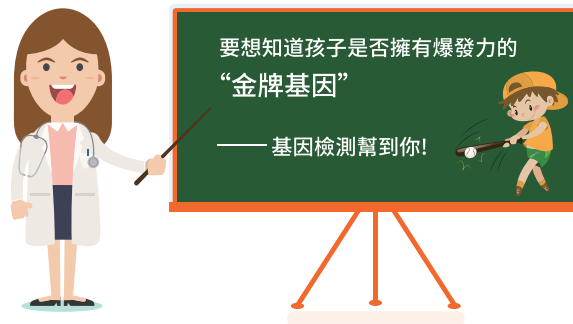


澳洲體育研究院研究發現，頂級運動員 ACTN3 基因的 C 型攜帶比例高達 95%，獲得世界 A 級賽事的冠軍運動員這一比例高達 100%。ACTN3 基因與人體肌肉的爆發力密切相關，被譽為神奇的“金牌基因”。

ACTN3 基因的某種變異體在西非裔黑人的基因庫中出現頻率很高，作為黑人後裔的牙買加人擁有這種變異體，它能夠提高人的瞬間速度，所以牙買加運動員有著和別人不一樣的爆發力。

③ 怎樣找準確的方向？

潛能基因檢測可以從基因的層面上，利用科學的方法去分析、判斷孩子是否具有某一或多方面的成長潛能，幫助家長知道孩子的**專長、特點**在哪裡，從而可以幫助家長科學地對孩子的潛能進行有針對性的誘導和培養。

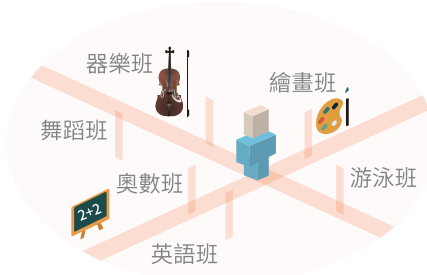

溫馨提示：

兒童潛能基因檢測是基於DNA的遺傳特性，檢測結果可作為參考。但是同時不建議忽視環境，教育，個人興趣等後天因素，而將基因檢測的結果作為孩子能力培養的唯一指導。後天的成長環境和個人的努力同樣重要。

④ 發生在身邊的真實案例



鈞鈞從小比其他小朋友**對音樂更敏感**

爸爸為他做了**兒童潛能基因檢測**，發現他在音樂上的確**比較有潛力**，在他5歲的時候送給鈞鈞屬於他的第一把吉他，希望他能在音樂道路上越走越遠。

⑤ 潛能基因項目

『天份評估』

42 項基因檢測
包含智商、工作能力、運動天賦等

『體質評估』

81 項基因檢測
包含五感、營養素加強、適應力等

『性格評估』

30 項基因檢測
包含情感智商、探求特質、人生態度等

